



Návod k montáži a používání

Aul 03Z.__L – Automatický nerezový žlab závěsný s lékařskými bateriemi

Základní technické údaje

Vnější (vnitřní) rozměr	AUL 03Z.1L	1250 (1190) x 500 (400) x 1030 (188÷200)
	AUL 03Z.2L	1900 (1840) x 500 (400) x 1030 (180÷200)
	AUL 03Z.3L	2500 (2440) x 500 (400) x 1030 (175÷200)
	AUL 03Z.4L	2995 (2940) x 500 (400) x 1030 (170÷200)
počet pákových baterií	AUL 03Z.1L	1 ks
	AUL 03Z.2L	2 ks
	AUL 03Z.3L	3 ks
	AUL 03Z.4L	4 ks
Průměr odpadu:		d 40 mm
Webová stránka produktu:		AUL 03Z.L

Popis nerezového žlabu

- AUL 03Z.__L je nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu. Základní provedení je s pákovými lékařskými bateriemi umístěnými na zadní stěně. Na objednávku může být žlab vybaven bezdotykovým ovládáním. Provedení žlabu je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu. Žlab je vyroben z nerezů jakosti AISI 316 L.
- Žlab je z čelní a bočních stran zakrytovaný. Vnitřní kouty jsou bez zakulacení.



Instalace nerezového žlabu

Stavební připravenost

- Připraven přívod vody a odpad dle obrázku

Montáž nerezového žlabu

- Osadit závěsnou lištu – upevnit vruty do hmoždinek ve zdi. Dodané hmoždinky a vruty umožňují osadit lištu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na stěnu z jiného materiálu (duté cihly, plynosilikáty atd.) je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.

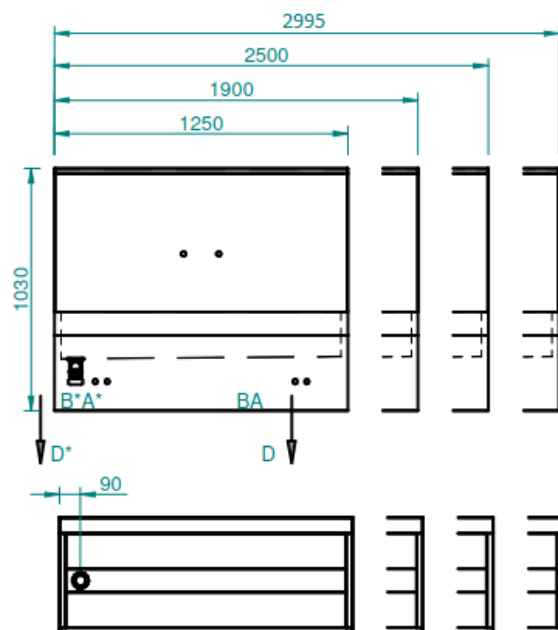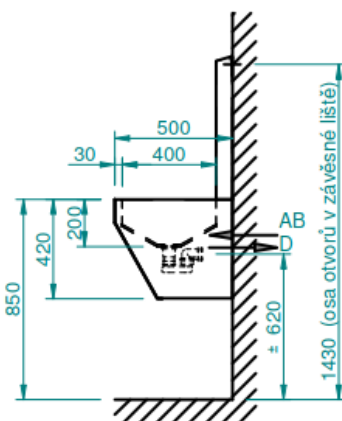

D – odpad
A – studená voda G 1/2"
B – teplá voda G 1/2"



2. Zavěsit žlab na lištu a zkontrolovat vodorovnost horní hrany.
3. Pomocí vrutů a hmoždinek zajistit čela žlabu.
4. Přívodní hadice zapojit na rohové ventily na přívodu teplé a studené vody.
5. Osadit sifon.
6. Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.

Dodaný materiál

- nerezové koryto – 1 ks
- hmoždinky, vruty a podložky – 7÷10 ks
- plastová zápachová uzávěra – 1 ks
- páková baterie – 1÷ 4 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 346 (AISI 316), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Upozornění

- Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.